












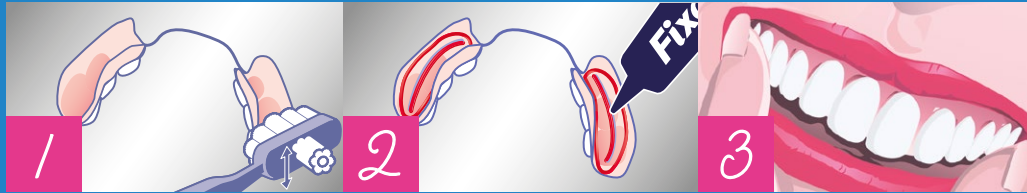


BASIS ASSORTIMENT	PREMIUM ASSORTIMENT			SUPER PREMIUM ASSORTIMENT	REINIGINGS-TABLETTEN
<p><b>GEMAKKELIJK ALLES IN ÉÉN KLEEFPASTA</b></p>	<p>VOOR DE <b>BESTE FIXATIE</b> TECHNOLOGIE*</p>	<p>VOOR DE <b>BESTE ANTIBACTERIËLE</b> TECHNOLOGIE*</p>	<p>VOOR DE <b>BESTE ANTI-VOEDSELRESTEN</b> TECHNOLOGIE*</p>	<p>VOOR DE <b>BESTE TANDVLEES-BESCHERMING*</b></p>	<p><b>COMPLETE CARE</b> 28 OF 54 STUKS</p>
<p></p> <p><input checked="" type="radio"/> Lichte Munt Smaak</p> <p><input type="radio"/> Neutrale Smaak</p> <p><input type="radio"/> Neutrale Smaak</p>	<p></p> <p></p> <p><input type="radio"/> Neutrale Smaak</p>	<p></p> <p></p> <p><input checked="" type="radio"/> Frisse Munt Smaak</p>	<p></p> <p></p> <p><input type="radio"/> Neutrale Smaak</p>	<p></p> <p></p> <p><input checked="" type="radio"/> Lichte Munt Smaak</p>	<p></p> <p></p>
<p>Sterke fixatie, sluit af en geeft comfort.</p>	<p>10x sterkere fixatie versus geen kleefpasta</p>	<p>Tot 6 uur lang een frissere adem versus geen kleefpasta.</p>	<p>5x betere afsluiting van voedselresten dankzij de ultra-dunne doseertuit versus geen kleefpasta.</p>	<p>Onze ultieme kleefpasta. Vermindert tandvleesirritatie vanaf de eerste dag**</p>	
<p>Reguliere doseertuit voor toepassing in stroken.</p> <p></p>		<p>Dunne doseertuit voor toepassing in doorlopende lijnen.</p> <p></p>			<p>* Binnen het Fixodent assortiment ** Met hard voedsel vs geen kleefpasta</p>

# UITLEG VOOR EEN GEDEELTELIJKE PROTHESE

## HOE FIXODENT TE GEBRUIKEN



### REINIG EN DROOG

Zorg ervoor dat de gedeeltelijke prothese volledig schoon en droog is voor het aanbrengen van de kleefpasta.

### AANBRENGEN

Breng het kleefmiddel aan in dunne, ononderbroken lijntjes zoals afgebeeld, of gebruik nog minder.

### INBRENGEN & VASTHOUDEN

Doe de gedeeltelijke prothese in en houd het kort op zijn plaats.

## HOE EEN GEDEELTELIJKE PROTHESE TE VERWIJDEREN



### SPOELEN

Spoel de mond met lauw water. Leg een handdoek op de wastafel om te voorkomen dat de gebitsprothese breekt wanneer deze zou vallen.

### VERWIJDEREN


Verwijder de gedeeltelijke prothese door deze zachtjes naar boven te duwen, en wees daarbij voorzichtig met de rest van de tanden.

### BEWAREN

Houd de gedeeltelijke prothese vochtig wanneer deze niet gebruikt wordt. Altijd bewaren in speciale reinigingsvloeistof voor gebitsprothesen of in het water leggen. Gebruik geen heet water, omdat de gedeeltelijke prothese hierdoor kan vervormen.

# UITLEG VOOR EEN VOLLEDIG KUNSTGEBIT

## HOE FIXODENT TE GEBRUIKEN

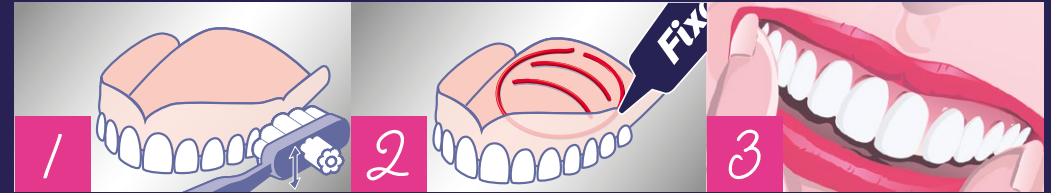

### REINIG EN DROOG

Zorg ervoor dat het kunstgebit volledig schoon en droog is voor het aanbrengen van de kleefpasta.

### AANBRENGEN

Breng het kleefmiddel aan in dunne, ononderbroken lijntjes zoals afgebeeld, of gebruik nog minder.

### INBRENGEN & VASTHOUDEN

Doe het kunstgebit in en houd het kort op zijn plaats.

## HOE EEN VOLLEDIG KUNSTGEBIT TE VERWIJDEREN



### SPOELEN

Spoel de mond met lauw water. Leg een handdoek op de wastafel om te voorkomen dat het kunstgebit breekt wanneer deze zou vallen.

### VERWIJDEREN

Verwijder de gedeeltelijke prothese door deze zachtjes naar boven te duwen.

### BEWAREN

Houd de gedeeltelijke prothese vochtig wanneer deze niet gebruikt wordt. Altijd bewaren in speciale reinigingsvloeistof voor gebitsprothesen of in het water leggen. Gebruik geen heet water, omdat het kunstgebit hierdoor kan vervormen.